

Alginaatin poistovinkki



Voit käyttää alginaatin poistamisen apuna astianpesukoneiden myötä tutuksi tullutta konetiskiainetta (jauheena tai nestemäisenä).

Poista lusikasta suurimmat alginaattijäänteet mekaanisesti.
Älä käytä terävää tai naarmuttavaa instrumenttia.

Sekoita sopivan kokoiseen astiaan n. 2-4% vahvuinen liuos.
Esim. n. 2l. vettä ja n. 0,5 dl. nestemäistä konetiskiainetta.

Liota lusikoita liuoksessa yön yli tai kunnes alginaattijäänteet ovat huuhdeltavissa pois vesihanalla.

Huom!

- Konetiskiaine sekoittuu ja huuhtoutuu kuumaan veteen helpommin.
- Liuoksen riittävä vahvuus selviää kokeilemalla.
- Erimerkkisten konetiskiaineiden "alginaatin sulatuskyvyissä" on pieniä eroja.
- Sopivan vahvuinen liuos on käyttökelpoista useille kymmenille lusikoille.
- Hävitä käytetty liuos saostusaltaan kautta viemäriin.