


Suuntamalli pikana



Kuva 1. Jäljennä tarkasteltava alue esim. alginaatilla tai puttyllä. Desinfioi ja kuivaa jäljennös.



Kuva 2. Täytä kohde huolellisesti pilareiden pohjia myöten.
-Vinkki: voit siirtää geeliä ruiskuun jossa on kapeampi kärki.

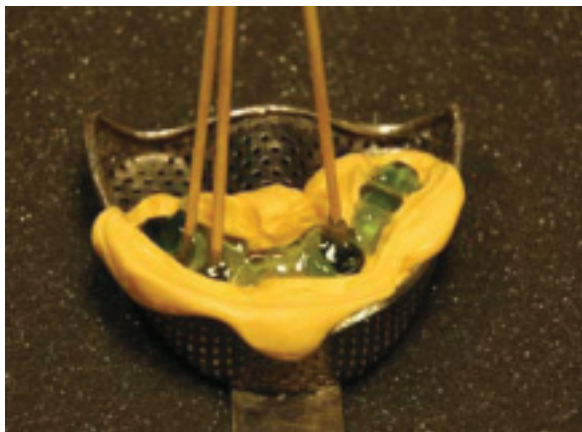

Kuva 3. "Pyöräytä" esim. hammastikulla ilmakuplat pois. Jätä tikku pystyyn hampaan tai pilarin kohdalle helpottamaan jatkokäsittelyä. Koveta valolla n.1-2min.

Vastaanotolla muutamassa minuutissa valmistettava suuntamalli, materiaalina valokovetteinen kirkas geeli.

- Auttaa yhdensuuntaisuuksien tarkistamisessa hiontatyön aikana. Huom! ei korvaa kipsimallia.
- Geelimäinen koostumus ei valu, helppo annostella vain tarvittava määrä.
- Läpikuultava valokovetteinen materiaali mahdollistaa nopean kovettumisen paksuissakin rakenteissa
- Kohtuulliset kustannukset, esimerkityöhön kului alle 3 g. geeliä.

(Dentsply, Triad Gel. 4 * 22 g. n. 90€ / Plandent)
Siltatyö D12-25



Kuva 4. Valmis suuntamalli.

- Vinkki: vajaanäytetyt alueet ja ilmakuplat voit täyttää pohjustamalla, eli annostele mallille geeliä, paina pohjaan ja koveta.



Kuva 5. Kipsimallimaisen mattapinnan saat pulveroimalla suuntamallin esim. kipsijauholla.

- Vinkki: voit myös kokeilla valkoista korjauslakkaa (kirjoituskone / toimistotarvike), pese ensin pois tahmea happi-inhibiokerros ja kuivaa.